


ドッグヘルパー フルボディー 取扱説明書

- ・本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に説明書の内容をご確認下さい。
また、この説明書はお手元に大切に保管して下さい。

使用上の注意

- ・安全にお使いいただく為に、以下の注意事項は必ず守って使用して下さい。
- ・開封後、梱包材は適切に処分して下さい。
- ・本製品は犬用です。犬以外の用途に使用しないで下さい。また、適応体重を超えるペットには絶対に使用しないで下さい。(適応体重は M が 32kg、L が 59kg までとなっております)
- ・商品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損や本製品に異常がない事を確認して下さい。
- ・輸入品につきメーカー説明書に記載されております保証に関する対応は致しかねますのでご了承下さい。
- ・使用時はバランスを崩さないよう、体重移動にはお気をつけ下さい。
- ・ワンちゃんの歩行スピードに合わせ、無理に引っ張らないようにして下さい。
- ・地面とワンちゃんの背筋が平行を保つようにして下さい。
- ・体型や怪我の状態に合わせ、各部の取り付け位置を調節して下さい。
- ・交通量の多い道路や人ごみの中は、危険ですので使用しないで下さい。
- ・バックルはパチッと音がし、しっかりと固定されたのを確認してからお使い下さい。しっかりと固定されていないまま使用すると、突然外れる危険性があります。

各部名称

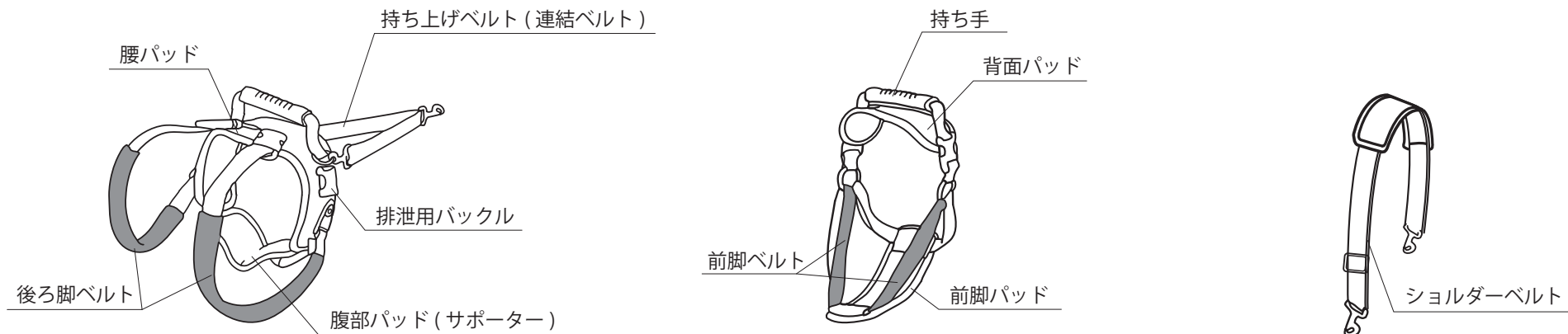

製品情報

サイズ：【M】胸囲 76～108cm、腰周り 59～81cm、後ろ脚周り 44～57cm

【L】胸囲 84～121cm、腰周り 66～93cm、後ろ脚周り 50～83cm

適応体重：【M】～32kg【L】～59kg


重量：【M】 800g 【L】 900g

材質：ナイロン繊維 【ハンドル】 ラバー


生産国：中国 (企画・デザイン：アメリカ)

装着方法


1. 腰パッドを尻尾の根元から5~6cmのところに合わせ、お腹に腹部パッドを当てバックルで結びます。
※バックルはパチッと音がするまで押し込んで下さい。
※女の子が使用する場合、腹部パッドのベルクロを外し、中にあるサポーターを取り外して下さい。

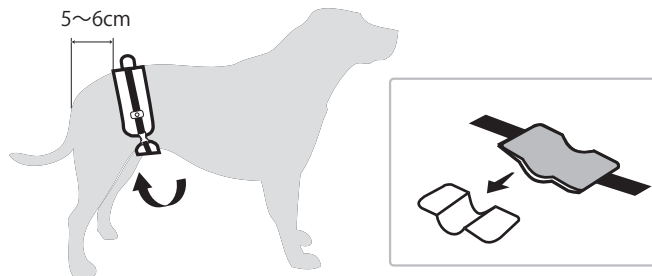


2. 後ろ脚に後ろ脚ベルトを回し、腰パッドと結びます。
ベルトを調節し、体にフィットしているか確認して下さい。
※ベルトの締め過ぎにご注意下さい。

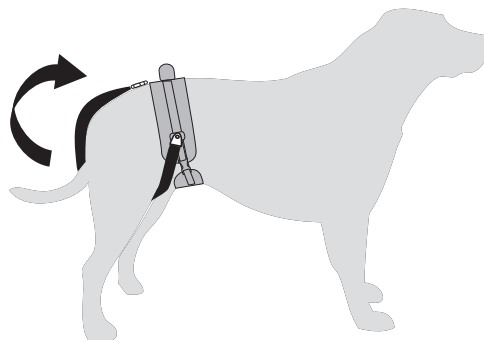


3. より体にフィットさせるため、調節パーツの位置を確認して下さい。

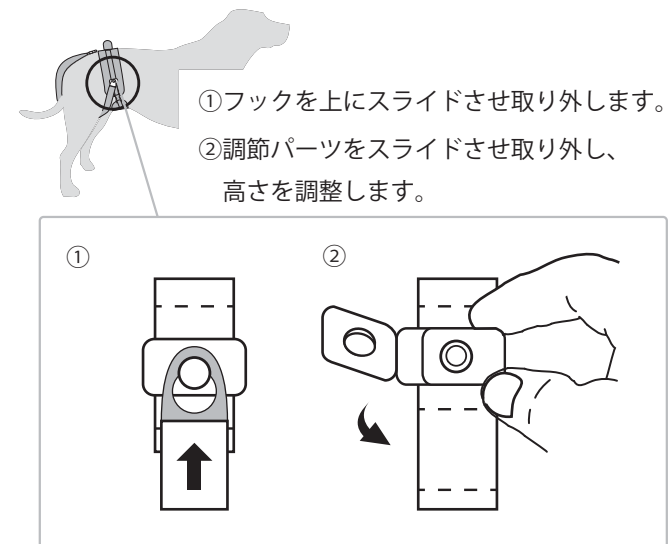


4. 前脚パッドを地面に置いた状態で、前脚ベルトに脚をくぐらせます。

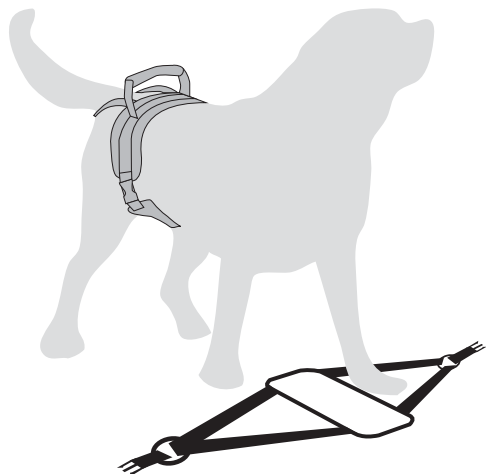

5. 首の後ろ部分に背面パッドを合わせ、持ち上げた前脚ベルトとバックルで結びます。

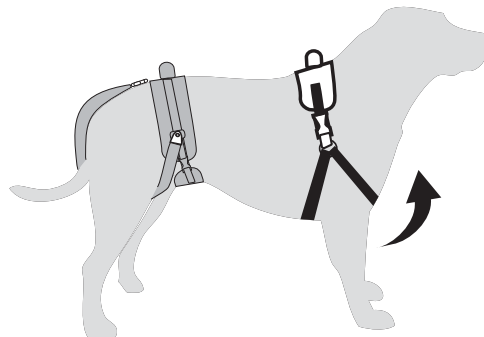


6. 連結ベルトを腰パッドと背面パッドのDカンに結びます。

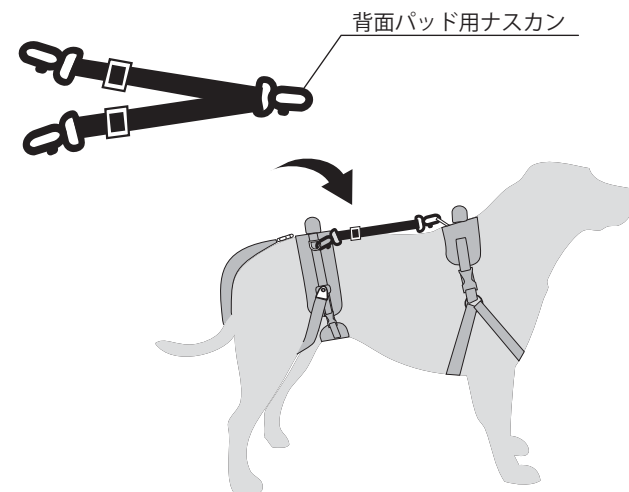


装着例

■フルボディー/ショルダーベルト

持ち上げベルトとショルダーベルトをナスカンで繋ぎ、残ったナスカンを背面パッドに付いているDカンに繋ぎ合わせます。

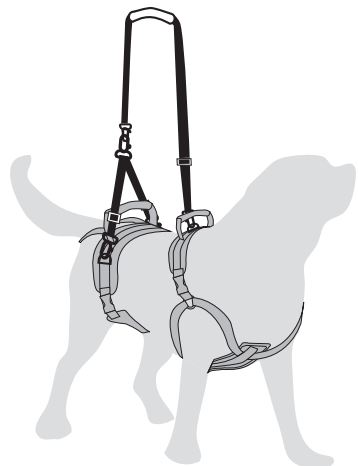


※脚の付け根位置から真上に引き上げ、オーナー様は真横に立った状態でご使用下さい。

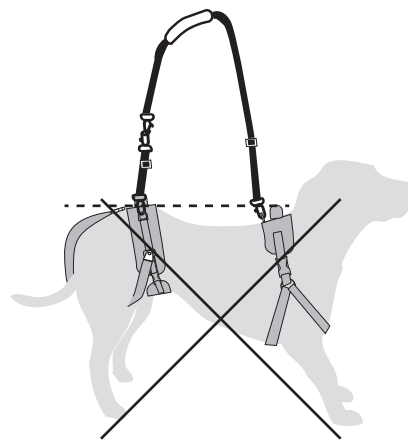


※地面とワンちゃんの背筋が平行を保つようにして下さい。

■リアオンリー/持ち上げベルト

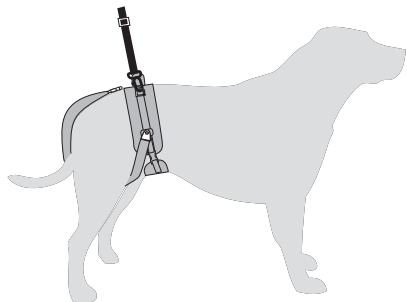


■フルボディー/連結ベルト

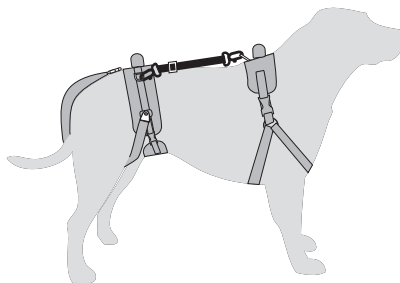

排泄時

■排泄時は、腹部パッドの片側を外し腰パッドにある排泄用バックルに留めて下さい。
※腹部パッドは取り外し手洗いが可能です。

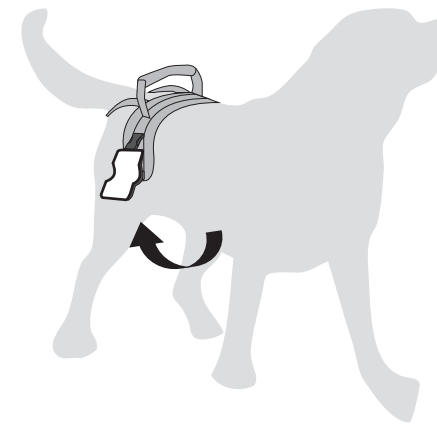

【輸入元】株式会社オーエフティー
〒666-0024
兵庫県川西市久代1丁目27番5号
Tel : 072-744-1017 Fax : 072-744-1018
E-mail : oft-info@onyx.ocn.ne.jp
URL : <http://oftww.com>